



Istruzione
DEGENZE CHIRURGICHE
Utilizzo di dopplers pocket
(portatile)

Codice	I _{CH} 17 / P _{CH} 01
Rif. Procura P _{CH} 01 Sez. 7.5 MQ	Pag. 1 di 2
Rev. 00	del 11/10/2024

SOMMARIO

1. Premessa
2. Scopo
3. Operatori
4. Modalità operative

Firma	Redazione	Firma	Verifica	Firma	Approvazione
	data 11/10/24		data 11/10/24		data 16/10/24



Istruzione
DEGENZE CHIRURGICHE
Utilizzo di dopplers pocket
(portatile)

Codice	I _{CH} 17 / P _{CH} 01
Rif. Proceura P _{CH} 01 Sez. 7.5 MQ	Pag. 2 di 2
Rev. 00	del 11/10/2024

1. PREMESSA

Il doppler tascabile è un rilevatore di battito cardiaco e flusso sanguigno, sia dei vasi superficiali che delle arterie più profonde.

2. SCOPO

Uniformare l'utilizzo dello strumento tra gli operatori.

L'apparecchio ha la funzione di rilevare il flusso sanguigno, sui punti contraddistinti con pennarello indelebile nero o blu dal medico specialista in chirurgia vascolare, tramite sonda incorporata al fine di valutare oggettivamente la presenza del battito e del ritmo.

3. OPERATORI

- Medico specialista in chirurgia vascolare
- Infermiere

4. MODALITA' OPERATIVE

Lo strumento è composto dalle seguenti parti: tavoletta alimentata con batteria alcalina e parte mobile con sonda incorporata da 5 mhz.

Per ottenere un buon segnale, applicare una quantità generosa di gel per sonde ecografiche sul punto di reperi contrassegnato dal medico.

Appoggiare la sonda con inclinazione di circa 45 gradi per ottenere:

- un suono acuto e pulsatile per le arterie;
- un suono simile a quello del vento tempestoso per le vene.

In assenza di rilevazione sonora avvisare il medico specialista vascolare.

Dopo ogni utilizzo, pulire con cura la sonda dal gel in eccesso, con carta/garza.

Non utilizzare soluzioni a base alcolica, nè solventi per non danneggiare la faccia della sonda.

Apporre particolare attenzione alla punta della sonda, sensibile agli urti e sfregamenti; riporla sempre nell'apposita custodia.