



Istruzione  
**REPARTO OPERATORIO**  
**Decontaminazione**  
**strumentario chirurgico**

Codice

I so 24/P so 02

Rif. Procedura P so 02  
Sez. 7.5 MQ

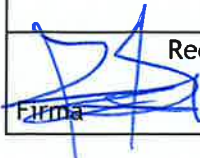
Pag. 1 di 3

Rev. 02

del 19/09/2025

**SOMMARIO**

1. Scopo/Premessa
2. Destinatari
3. Modalità operative
  - 3.1 Strumentario generico
  - 3.2 Materiali non immergibili
4. Valutazione e controllo

|                                                                                              |                           |                                                                                              |                          |                                                                                                |                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <br>Firma | Redazione<br>data 19/9/25 | <br>Firma | Verifica<br>data 22/9/25 | <br>Firma | Approvazione<br>data 24/9/25 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|



Istruzione  
**REPARTO OPERATORIO**  
**Decontaminazione**  
**strumentario chirurgico**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Codice                                | I so 24/P so 02 |
| Rif. Procedura P so 02<br>Sez. 7.5 MQ | Pag. 2 di 3     |
| Rev. 02                               | del 19/09/2025  |

**1. SCOPO/PREMESSA**

Lo scopo della seguente istruzione consiste nella riduzione immediata della carica microbica dal materiale riutilizzabile da sottoporre a lavaggio, nel ridurre la possibilità di esporre il personale a rischi d'infezione e nel mantenere umide le superfici del materiale per facilitare la rimozione dello sporco.

Tutto lo strumentario chirurgico viene solo decontaminato in Struttura.

Il lavaggio e la sterilizzazione sono a carico di una ditta appaltatrice presso sede esterna.

**2. DESTINATARI**

Infermieri e OSS.

**3. MODALITA' OPERATIVE**

**3.1 STRUMENTARIO GENERICO**

Ad inizio turno viene preparata la soluzione decontaminante in due lavandini di acciaio e in due vasche. Viene utilizzato un decontaminante/detergente tri-enzimatico con proprietà disinfettante, ANIOSYME

Nella fase di allestimento della soluzione disinfettante, bisogna attenersi alle indicazioni del produttore e compilare l'apposito modulo (Mod. 0020 "Preparazione Soluzione per Decontaminazione Strumentario Chirurgico") in cui verrà indicata l'ora di preparazione della soluzione. L'operatore OSS addetto alla decontaminazione deve indossare un camice plastificato, mascherina con visiera, guanti anti taglio, guanti di gomma.

La durata della fase di immersione dipende dalle indicazioni fornite dal produttore del disinfettante. I prospetti dei prodotti e le relative diluizioni sono presenti in centrale di sterilizzazione.

Le soluzioni decontaminanti vengono sostituite dopo 3/4 ore dall'utilizzo (anche prima in caso di strumentario particolarmente sporco) e per tutti i presidi chirurgici ci si deve attenere alla scheda tecnica.

Passato il tempo di immersione, i dispositivi vengono risciacquati sotto acqua corrente e poi messi nel carrello sigillato per il trasporto alla ditta appaltatrice.



Istruzione  
**REPARTO OPERATORIO**  
**Decontaminazione**  
**strumentario chirurgico**

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| Codice                                | I so 24/P so 02 |
| Rif. Procedura P so 02<br>Sez. 7.5 MQ | Pag. 3 di 3     |
| Rev. 02                               | del 19/09/2025  |

### 3.2 MATERIALI NON IMMERGIBILI

I materiali non immergibili (tipo trapani) saranno puliti con un panno imbevuto di soluzione decontaminante (Aniosyme).

### 4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).