



Istruzione

REPARTO OPERATORIO
Utilizzo del passa malati

Codice

I so 10/P so 01

Rif. Procedura P so 01
Sez. 7.5 MQ

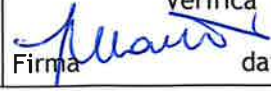
Pag. 1 di 3

Rev. 00

del 17/10/2024

SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Redazione	Verifica	Approvazione
Firma  data 17/10/24	Firma  data 18/10/24	Firma  data 21/10/24

ATTENZIONE: la mancanza delle firme indica che questo documento è una stampa della versione aggiornata disponibile in rete ed utilizzabile per sola lettura.

**1. SCOPO**

La seguente istruzione ha per scopo il corretto utilizzo dell'apparecchio passa malati. L'apparecchio passa malati ha due funzioni:

- agevola il trasporto del paziente dal letto di reparto alla barella o piano operatorio favorendo il personale nella movimentazione;
- impedisce contaminazione tra letti o barelle provenienti dai reparti e il blocco operatorio

2. DESTINATARI

Infermieri ed OSS.

3. MODALITA' OPERATIVE

L'apparecchio viene acceso dall'IP del 1° turno addetto alla Sala Risveglio tramite l'apposita chiave depositata presso l'Ufficio Caposala.

Il paziente accede al blocco operatorio mediante passaggio sul nastro trasportatore; allo stesso modo l'apparecchio viene utilizzato per il passaggio inverso.

Il dispositivo è manovrato dal personale della Sala Risveglio e viene utilizzato solo per il passaggio in uscita del paziente e per i pazienti allettati sia in entrata sia in uscita.

Durante il passaggio sul nastro trasportatore, si deve prestare attenzione al posizionamento del paziente ed alla presenza di cuscini/teleria. Tutta la biancheria in più (cuscini, lenzuola, coperte) deve essere rimossa per evitare la rottura del telaio.

Dopo ogni trasferimento, sia in ingresso che in uscita, il nastro viene pulito con del detergente.

Dopo ogni manovra il vetro divisorio viene tenuto rigorosamente chiuso.

A fine seduta operatoria il personale addetto alle pulizie procede alla detersione e disinfezione del nastro trasportatore e delle altre parti del dispositivo.

A questo punto si spegne il passa malati.



Istruzione

REPARTO OPERATORIO
Utilizzo del passa malati

Codice

I so 10/P so 01

Rif. Procedura P so 01
Sez. 7.5 MQ

Pag. 3 di 3

Rev. 00

del 17/10/2024

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).