



Istruzione

REPARTO OPERATORIO Lavaggio del Fibroscopio

Codice

I so 16/P so 01

Rif. Procedura P so 01
Sez. 7.5 MQ

Pag. 1 di 5

Rev. 00

del 18/10/2024

SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Redazione		Verifica		Approvazione	
Firma		Firma		Firma	
data	18/10/24	data	18/10/24	data	21/10/24

**1. SCOPO**

Lo scopo della seguente istruzione è quello di permettere un corretto lavaggio del Fibroscopio al fine di ridurre la carica microbica.

2. DESTINATARI

Infermieri, OSS e personale addetto al lavaggio ferri (ditta appaltatrice).

3. MODALITA' OPERATIVE**MATERIALE OCCORRENTE**

- DPI;
- Pompa per prova di tenuta;
- 3 cc di sapone di Marsiglia;
- 500 cc di acqua demineralizzata;
- arcella;
- garza TNT;
- 2 siringhe da 20 cc;
- raccordino cilindrico in silicone;
- scovolino (all'occorrenza).

PROCEDIMENTO

Predisporre un'arcella con 3 cc di sapone di Marsiglia liquido in 300 cc di acqua demineralizzata. Prima di cominciare qualsiasi operazione sull'apparecchio effettuare la prova di tenuta del rivestimento.

Quindi collegare la pompa all'apposito raccordo sul Fibroscopio e indurre una pressione di 100 - 120 mmHg ed osservare la tenuta. Nel caso l'esito sia positivo si può procedere alla detersione, altrimenti il Fibroscopio va passato solo con garze umide ed inviato al centro per le riparazioni del caso.

Quindi in caso di tenuta positiva si procede, pertanto immergere della garza in TNT nella soluzione preparata con sapone e acqua distillata e passare il Fibroscopio in tutta la sua lunghezza evitando la zona dell'oculare.

Ripetere l'operazione più volte con le garze ben intrise.



A questo punto si procede al lavaggio dei canali interni, nel caso siano utilizzati. Collegare il raccordino cilindrico in silicone alla siringa, aspirare 20 cc di soluzione detergente ed installarla nel canale di aspirazione, ripetere l'operazione più volte.

Effettuare la medesima operazione anche per l'altro canale (quindi è possibile utilizzare anche un apposito scovolino da spingere nel canale), dopodiché si procede alla detersione dell'oculare avendo cura di utilizzare garze appena umide.

Eliminare l'eventuale soluzione detergente rimasta nell'arcella, risciacquarla abbondantemente e porvi 200 cc di acqua distillata che servirà per l'eliminazione di eventuali residui di detergente dal Fibroscopio. Quindi ripetere le operazioni esposte in precedenza, seguendo lo stesso ordine utilizzando, questa volta, solo l'acqua distillata.

Finito ciò si può utilizzare un'altra siringa da 20 cc riempita d'aria da spruzzare nei due canali al fine di eliminare gli eccessi di acqua rimasta e quindi permettere una più facile asciugatura.

Al termine di tutto si passa l'esterno con garza TNT per asciugare, quindi si ripone il tutto nell'apposito armadio.

Insieme al fibroscopio è presente un modulo in cui il personale firma la procedura effettuata. (vedi allegato pagina seguente)



Istruzione

REPARTO OPERATORIO
Lavaggio del Fibroscopio

Codice

I so 16/P so 01

Rif. Procedura P so 01
Sez. 7.5 MQ

Pag. 4 di 5

Rev. 00

del 18/10/2024

FIBROSCOPIO: LAVAGGIO, PROVA TENUTA E CONTROLLO

DATA	LAVAGGIO	PROVA TENUTA + CONTROLLO INF SIGLA



Istruzione

REPARTO OPERATORIO
Lavaggio del Fibroscopio

Codice

I so 16/P so 01

Rif. Procedura P so 01
Sez. 7.5 MQ

Pag. 5 di 5

Rev. 00

del 18/10/2024

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).