



Istruzione

REPARTO OPERATORIO
Sterilizzazione del Fibroscopio

Codice

I so 17/P so 02

Rif. Procedura P so 01
Sez. 7.5 MQ

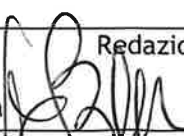
Pag. 1 di 2

Rev. 00

del 18/10/2024

SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Redazione Firma  data 18/10/24	Verifica Firma  data 21/10/24	Approvazione Firma  data 23/10/24
---	--	--

**REPARTO OPERATORIO**
Sterilizzazione del Fibroscopio**1. SCOPO**

Lo scopo della seguente istruzione è quello di permettere una corretta sterilizzazione con acido per-acetico del Fibroscopio.

2. DESTINATARI

Infermieri, OSS e personale addetto al lavaggio ferri (ditta appaltatrice).

3. MODALITA' OPERATIVE

Viene predisposta un'apposita vaschetta ovale con coperchio e temporizzatore. All'interno di questa vaschetta si introducono 5 litri di acqua e ANIOXY.

Dopo aver lavato e asciugato l'endoscopio secondo il protocollo già in uso si immerge lo stesso nella vasca precedentemente preparata per un tempo totale di 15 minuti (per la sterilizzazione) avendo l'accortezza di far penetrare la soluzione in tutte le cavità.

Dopo il tempo previsto si procede a prelevare il Fibroscopio con metodologia aseptica, lavarlo con acqua sterile demineralizzata, asciugarlo e riporlo in luogo dedicato.

La soluzione attivata ha una durata giornaliera e dopo tale termine il prodotto deve essere smaltito secondo normativa vigente¹.

Quindi l'Adasystem va lavato e asciugato così da essere pronto per una successiva preparazione.

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).

¹ Per tale prodotto è possibile lo smaltimento in fossa biologica.