



Istruzione
REPARTO OPERATORIO
Stoccaggio del materiale
sterilizzato

Codice	I so 29/P so 01
Rif. Procedura P so 02 Sez. 7.5 MQ	Pag. 1 di 3
Rev. 00	del 18/10/2024

SOMMARIO

1. Scopo
2. Destinatari
3. Modalità operative
4. Valutazione e controllo

Redazione	Verifica	Approvazione
Firma  data 18/10/24	Firma  data 21/10/24	Firma  data 23/10/24



Istruzione
REPARTO OPERATORIO
Stoccaggio del materiale
sterilizzato

Codice	I so 29/P so 01
Rif. Procedura P so 02 Sez. 7.5 MQ	Pag. 2 di 3
Rev. 00	del 18/10/2024

1. SCOPO

Lo scopo della seguente istruzione è quello di consentire una corretta conservazione del materiale sterilizzato fino al momento del suo utilizzo.

2. DESTINATARI

Infermieri ed OSS.

3. MODALITA' OPERATIVE

Dopo il processo di Sterilizzazione, vedere P SO 02 Gestione processo di sterilizzazione, il materiale viene scaricato in un luogo dedicato in appositi scaffali. Questi ultimi sono muniti di ruote in maniera tale da facilitarne lo spostamento per la pulizia del locale.

Affinché la conservazione sia efficace, il locale non deve essere esposto a polvere e umidità, la confezione deve essere integra, la saldatura continua ed il pacco manipolato il meno possibile. L'operatore che manovra questo materiale deve avere mani asciutte e pulite. Se una confezione cade a terra, se viene a contatto con materiale sporco, se si bagna o si lacera, il contenuto non deve essere più considerato sterile e quindi va confezionato e riprocessato in autoclave.

La fase di conservazione di ciò che è stoccato è di breve durata poiché nella nostra divisione la maggior parte del materiale viene adoperato in giornata, tuttavia gli armadi devono essere puliti e chiusi. I pacchi sterili, sono suddivisi per specialità, sono conservati in ordine di scadenza che viene verificata ogni settimana. Il materiale in scadenza viene riconfezionato e sterilizzato.

Tabella 1. Tempi di mantenimento della sterilità

Tipo di confezionamento	Durata (in giorni)
Containers	30
Carta Medical-grade in doppio strato	30
Busta doppia	30



Istruzione
REPARTO OPERATORIO
Stoccaggio del materiale
sterilizzato

Codice I so 29/P so 01

Rif. Procedura P so 02
Sez. 7.5 MQ

Pag. 3 di 3

Rev. 00

del 18/10/2024

4. VALUTAZIONE E CONTROLLO

La valutazione del rispetto della seguente istruzione è competenza del coordinatore o in sua assenza dell'Infermiere delegato, tramite ispezione e verifica casuale del corretto svolgimento delle modalità operative (vedere Modulo 0288).